

Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci 4-kołowy EIO

Instrukcja montażu śpiwora



Krok 1 - nasuń dolną część śpiwora na podnózek.

Krok 2 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem na ramie bocznej pod siedziskiem.

Krok 3 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem pod przegubem składania wózka.



Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci 4-kołowy EIO

Instrukcja montażu osłony przeciwdeszczowej



Krok 2



Krok 3

Krok 1 - nasuń dolną część osłony przeciwdeszczowej na podnózek.

Krok 2 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem na ramie bocznej pod przegubem składania wózka.

Krok 3 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem nad przegubem składania uchwytu do prowadzenia.



Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci 3-kołowy JOGGER

Instrukcja montażu śpiwora



Krok 1 - nasuń dolną część śpiwora na podnóżek.

Krok 2 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem na ramie bocznej pod siedziskiem.

Krok 3 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem nad przegubem składania wózka.



Wózek inwalidzki specjalny dla dzieci 3-kołowy JOGGER

Instrukcja montażu osłony przeciwdeszczowej



Krok 1 - nasuń dolną część osłony przeciwdeszczowej na podnóżek.

Krok 2 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem na ramie bocznej nad przegubem (dla lepszego dostępu do ramy należy odpiąć tapicerkę).

Krok 3 - zamocuj i zapnij taśmę z rzepem pod przegubem składania uchwytu do prowadzenia.



Dane kontaktowe



Producent

Bergeron Healthcare
22 South Second Street
Dolgeville, NY 13329,
ZJEDNOCZONE STANY AMERYKI



Upoważniony przedstawiciel

Global Carehab
HOLMSTRUPGAARDVEJ 11
8220 BRABRAND
DANIA
+45 24 65 55 50



Dystrybutor w Polsce

mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21
www.mdh.pl

mdh Sp. z o.o. (Dystrybutor w Polsce)
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź, Polska
tel. +48 42 674 83 84, fax. +48 42 636 52 21
www.mdh.pl
www.viteacare.com

